

## Wischtuch-Spender

### wiederbefüllbarer Spender zur Verwendung mit – in Desinfektionslösung getränkten – Wischtüchern

- optimale Abgabe des Wirkstoffes auf die Fläche
- Schutz vor externer Kontamination und Verdunstung durch geschlossenen Spender
- optimale Füllstandskontrolle durch transparenten Deckel

#### Charakteristika

wiederverschließbarer Vlies-Tuchspender zur hygienischen Aufbewahrung und Entnahme von feuchten Tüchern zur Desinfektion von Flächen, absolut dichter Spendereimer aus Polypropylen

#### Anwendungsbereiche / Handhabung

KRINKO-Anforderungen zur Reinigung und Desinfektion von Flächen beachten.

#### Wischtuch-Spender unter Verwendung trockener Vliesrollen:

Wischtuch-Spender öffnen, trockene Wischtücherrollen (Best.-Nr.: 210803) hineingeben und mit 1,2 l gebrauchsfertiger INTERMED Desinfektionslösung (Best.-Nr.: 210808) tränken. Nach 30 Minuten können die Wischtücher benutzt werden. Das erste Tuch verwerfen. Nach Gebrauch Spender wieder verschließen. Standzeit: bis zu 28 Tagen  
Lot-Nr. und Ansatzdatum auf Zusatzetikett eintragen.  
Entsprechende Etiketten liegen den Wischtüchern bei.

#### Wischtuch-Spender unter Verwendung gebrauchsfertiger, vorgetränkter Desinfektionstücher (Quick Wipes):

Wischtuch-Spender öffnen, vorgetränkte Quick Wipes Desinfektionstücher (Best.-Nr.: 211180) an der Schnittkante aufschneiden und in Spender einsetzen. Das erste Tuch Quick Wipes Desinfektionstücher aus der Mitte der Rolle führen und den vorderen Teil des Tuches durch den Entnahmestern im Deckel des Spenders führen. Schutzdeckel schließen und darauf achten, dass das Tuch komplett umschlossen ist. Der Schutzdeckel ist nach jeder Tuchentnahme wieder sorgfältig zu schließen, um nachfolgende Tücher vor Austrocknen zu schützen. Flächen und Gegenstände vollständig benetzen. Einwirkzeit einhalten.  
Standzeit: 3 Monate  
Lot-Nr. und Ansatzdatum auf Zusatzetikett eintragen.  
Entsprechende Etiketten liegen den Wischtüchern bei.

#### Wichtig

Vor der Wiederbefüllung ist der Spender inklusive Deckel vorbeugend zu reinigen und mit geeigneten Desinfektionsmitteln zu desinfizieren (s. Aufbereitungsanweisung für Tuchspendersysteme).

#### Spezielle Anforderungen in Bereichen mit besonderem Infektionsrisiko

„Die Desinfektionsmittelkommission beim VAH empfiehlt, Tuchspendersysteme, die wiederaufbereitet werden müssen – mit Ausnahme von alkoholischen Mitteln – nicht in Bereichen mit besonderen Infektionsrisiken einzusetzen. Das gleiche gilt auch, wenn nur deren Verschlussvorrichtungen (Deckel) wiederaufbereitet sind.“ (Quelle: Hygiene & Medizin 2014; 39-9 S. 92–93)

Zu diesen Bereichen zählen z.B.:

- Intensivtherapie
- Hämatookologie
- Neonatologie
- Verbrennungsstationen

#### Lieferformen

**Wischtuch-Spender**  
für 70 Tücher = 1 Rolle

Best.-Nr.: 210802

#### Desinfektionslösung für Wischtücher

1,2 l-Beutel

Best.-Nr.: 210808

**Wischtücher**  
3 Rollen à 70 Tücher

Best.-Nr.: 210803

#### Quick Wipes Desinfektionstücher

Rolle à 70 Tücher

Best.-Nr.: 211180

3 Rollen à 70 Tücher

Best.-Nr.: 211181



Stand 05/2018

## Wischtuch-Spender

### Anwendungsanleitung



1. Schutzkittel und Arbeitshandschuhe benutzen, um sich zu schützen und Kontamination zu verhindern.



2. Trockene INTERMED Vliestuchrolle aus der Verpackung nehmen und in den geöffneten Spender einsetzen. \*



3. INTERMED Desinfektionslösung (1,2l) spiralförmig in den Wischtuchspender einfüllen. \*\*



4. Das erste Wischtuch aus der Mitte der Tuchrolle herausziehen, dann den vorderen Teil des Tuches durch das sternförmige Entnahmesystem führen.



5. Deckel des Wischtuch-Spenders durch festes Andrücken verschließen.



6. Schutzdeckel des Entnahmesystems fest verschließen. Darauf achten, dass das erste Tuch vollständig vom Schutzdeckel umschlossen und damit vor Austrocknung geschützt ist.



7. Beigefügtes Deckeletikett aufkleben. Die vollständig ausgefüllten Ansatzinformationen (Produktname, Konzentration, Einwirkzeit, Charge, Ansatz) eintragen.



8. Der befüllte Wischtuch-Spender ist einsatzbereit, wenn nach ca. 30-60 Minuten alle Tücher durchtränkt sind. Das erste Tuch ist zu verwerfen! Nach jedem Gebrauch Spender wieder fest verschließen.

\* Alternative: Bereits vorgetränkte Tücher (z. B. INTERMED QuickWipes) mit dem Beutel einsetzen und mit Schritt 4 fortfahren.

\*\* Sollten Sie andere Lösungen verwenden, beachten Sie bitte die Herstellerangaben.

## Wischtuch-Spender

### Aufbereitungsanweisung

für die manuelle Aufbereitung\*

### Reinigung und Desinfektion

#### Spender



Innen- und Außenflächen sowie Rand des neuen oder restentleerten Spenders mit dem Reinigungs-, Desinfektionstuch gründlich reinigen und desinfizieren.

#### Deckel



Deckelinnen- und Außenseiten, Rand des Deckels, Innenflächen und Ränder der Entnahmeöffnung gründlich reinigen und desinfizieren.

Alle Teile vollständig trocknen lassen, insbesondere die Ränder des Deckels und des Eimers. Zusätzlich empfiehlt sich entsprechend der Empfehlungen der Desinfektionsmittel-Kommission eine stichprobenartige Untersuchung des Inhalts von Tuchspendersystemen, um Kontaminationen frühzeitig erkennen zu können.

⚠ 2 Minuten Gesamtreinigung

⚠ 2 Minuten Einwirkzeit  
Wischdesinfektion  
INTERMED Desinfektionstücher

\* Aufgrund der Validierbarkeit empfiehlt sich die chemothermische Aufbereitung.  
Der von uns gelieferte Spendereimer kann maschinell bis max. 60°C aufbereitet werden.