


Gesichtsschutzschild

Universaler, aufklappbarer Gesichtsschutz
aus Polycarbonat

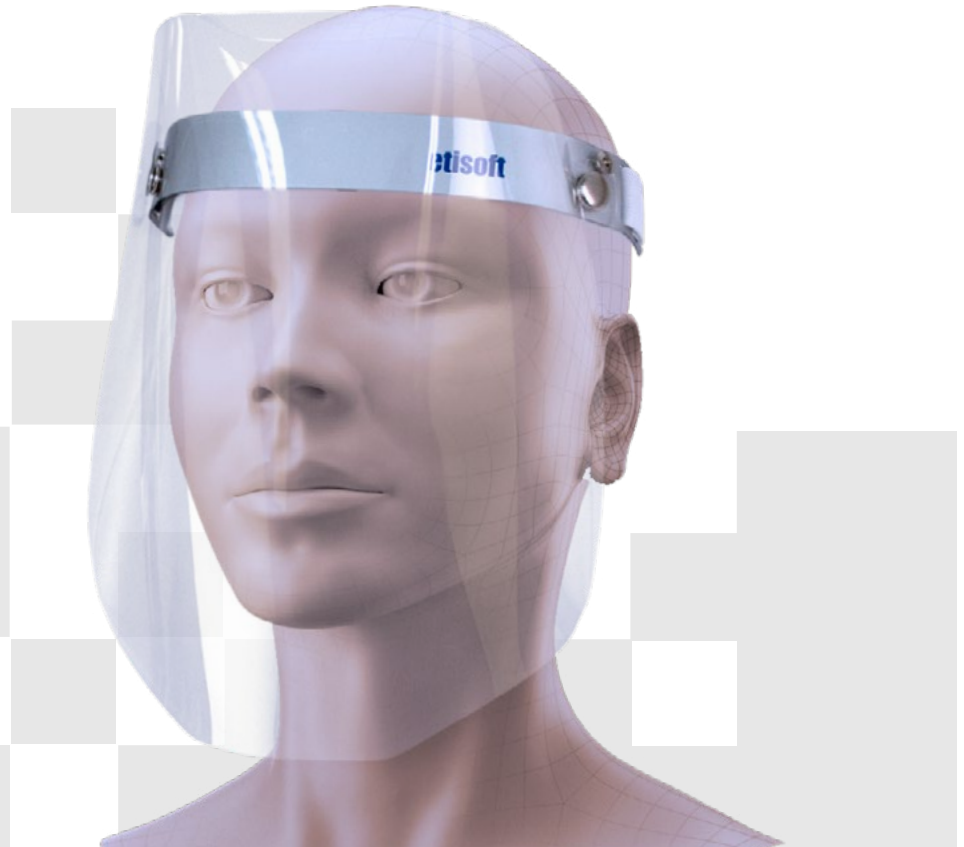

CE



An Produktionslinien



In Krankenhäusern, Kliniken, Labors



In Lackierereien, Schreinereien,
Schleifereien

Beschreibung

Das Schild ist aus beständigem, hochtransparentem Polycarbonat und schützt das Gesicht, ohne das Blickfeld einzuschränken. Das Gesichtsschutzschild schützt vor Staub, Aerosol, Spritzern und leichten oberflächlichen mechanischen Verletzungen. Es reduziert den Kontakt von kontaminierten Händen oder Gegenständen mit den Schleimhäuten von Mund, Augen und Nase.

Das Produkt erfüllt die Anforderungen der Verordnung 2016/425 der Europäischen Union über persönliche Schutzausrüstung und zur Aufhebung der Richtlinie 89/686/EWG des Rates. Hergestellt in Polen.

Anwendung

- Schutz von Personen, die in staubigen und verschmutzten Räumen arbeiten.
- Schutz des medizinischen Personals in Krankenhäusern und Kliniken, das dem direkten Kontakt mit infizierten Patienten ausgesetzt ist.

GESICHTSSCHUTZSCHILD

TECHNISCHE DATEN



BESCHREIBUNG

Das Gesichtsschutzschild besteht aus einem Schutzschild, das an einem verstellbaren Stirnband befestigt wird. Das große aufklappbare Schutzschild ist aus beständigem, hochtransparentem Polycarbonat gefertigt, das das Gesicht schützt, ohne das Blickfeld des Benutzers einzuschränken. Die Druckknöpfe ermöglichen schnelle Montage. Durch das elastische Befestigungsband passt sich das Schutzschild an jede Kopfform an und gewährt, dank der weichen Schaumstoff-Polsterung im Stirnbereich, hohen Tragekomfort.

WARTUNG


Das Produkt ist wiederverwendbar und kann mit Reinigungsmitteln auf Alkoholbasis desinfiziert werden. Die Regelmäßige Reinigung mit einem Mikrofasertuch gewährleistet gleichbleibenden Sehkomfort und richtige Hygiene. Die Gesichtsschutzschilder sollten bei Raumtemperatur an einem trockenen Ort gelagert werden, wobei eine längere Sonneneinstrahlung zu vermeiden ist.

VORTEILE

- Effektiver Gesichtsschutz mit weitem Blickfeld
- Hohe Qualität und Beständigkeit
- Schnelle und einfache Montage
- Aufklappbares Schutzschild
- Verstellbares Befestigungsband mit weicher Schaumstoff-Polsterung
- Möglichkeit der Desinfektion mit Mitteln auf Alkoholbasis

Das Set enthält: Schutzschild aus Polycarbonat, Stirnband, elastisches Befestigungsband und zwei Regler.

Das Schutzschild wird mit den Druckknöpfen am Stirnband befestigt. Bevor das Schutzschild befestigt wird, muss die Schutzfolie von beiden Seiten entfernt werden.

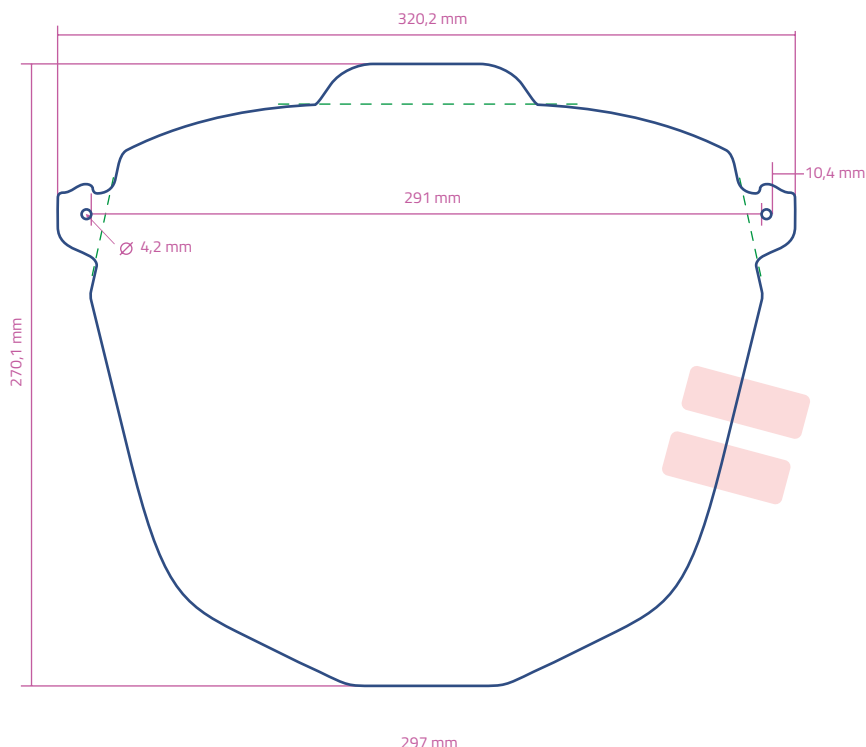

SCAN ME
Mehr Informationen

- Die in der Karte erwähnten Marken sind das alleinige Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
- Die vorgestellten Empfehlungswerte basieren auf zuverlässigen Tests.
- Die im technischen Datenblatt angegebenen Werte sind Durchschnittswerte der Testergebnisse und dienen der Information.
- Die angegebenen Werte und Empfehlungen sind nicht für Spezifikationszwecke bestimmt und können nicht als verbindliche technische Daten verwendet werden.



Etisoft Sp. z o.o.
ul. Szara 21, 44-100 Gliwice
tel.: +48 32 3328050
fax: +48 32 3328001
office@etisoft.com.pl

NIP: PL6312362213
KRS: 0000138415
BDO: 000018097
GRUNDKAPITAL: 5 mln PLN
etisoft.com.pl



gliszczy 14/10
www.etisoft.com.pl