

Wischtuch-Spender

Aufbereitungsanweisung

für die manuelle Aufbereitung*

Reinigung und Desinfektion

Spender



Innen- und Außenflächen sowie Rand des neuen oder restentleerten Spenders mit dem Reinigungs-, Desinfektionstuch gründlich reinigen und desinfizieren.

Deckel



Deckelinnen- und Außenseiten, Rand des Deckels, Innenflächen und Ränder der Entnahmeöffnung gründlich reinigen und desinfizieren.

Alle Teile vollständig trocknen lassen, insbesondere die Ränder des Deckels und des Eimers. Zusätzlich empfiehlt sich entsprechend der Empfehlungen der Desinfektionsmittel-Kommission eine stichprobenartige Untersuchung des Inhalts von Tuchspendersystemen, um Kontaminationen frühzeitig erkennen zu können.

⚠ 2 Minuten Gesamtreinigung

⚠ 2 Minuten Einwirkzeit
Wischdesinfektion
INTERMED Desinfektionstücher

* Aufgrund der Validierbarkeit empfiehlt sich die chemothermische Aufbereitung.
Der von uns gelieferte Spendereimer kann maschinell bis max. 60°C aufbereitet werden.