



PC-60E Fingerpulsoximeter
für Erwachsene, Kinder & Babys

Art.-Nr. M900004

- externe Sensoren für Babys / Kinder verfügbar
- automatische Alarmfunktion
- automatisch drehbares Farbdisplay in vier Ansichtsperspektiven
- Maße: ca. 66 x 36 x 33 mm (L x B x H)
- Gewicht: ca. 60 g (inkl. Batterien)

Bestellinformationen:

Einheit	Art. Nr.	Bezeichnung
Stk.	M900004	PC-60E Fingerpulsoximeter



Optionen / Zubehör für Modell PC-60E:

- Soft-, Fingerclip- oder Wrapsensor
- schnelle, intuitive Installation

Einheit	Art. Nr.	Bezeichnung
Stk.	M900008	Soft-Sensor Kinder für PC-60E
Stk.	M900010	Fingerclip Sensor Kinder für PC-60E
Stk.	M900011	Wrap-Sensor Babys / Kleinkinder / Kinder für PC-60E, mit Klettverschluss (nur Einzelpersoneneinsatz)

Einfache und schnelle Messung
PC-60E

Das Fingerpulsoximeter PC-60E ist eine Innovation unter den Oximetern, denn durch die Konnektion von externen Sensoren ist es für alle Patientengruppen (Erwachsene, Kinder, Babys) einsetzbar. Das Allrounder-Gerät verfügt außerdem über ein sehr großes, glasklares Farbdisplay (optimal für abgedunkelte Räume) und eine automatische Alarmfunktion. Bei Abweichung von Normwerten werden Sie visuell (Anzeige blinkt) und akustisch (Piepton) alarmiert. Besonders für den professionellen Bereich wie Ärzte, Kliniken und Rettungsdienst geeignet.



PC-60B STRONG TIPP
Fingerpulsoximeter

Art.-Nr. M900035

- extrem robustes, spritzwassergeschütztes Gehäuse
- scharfes, glasklares LCD-Display – Anzeige: Pulsfrequenz (PR), Perfusionsindex (PI) und aktuelle Sauerstoffsättigung
- angenehmer Tragekomfort durch weiches Sensormaterial
- Betrieb bis zu 30 Stunden mit 2x AAA-Batterien
- Maße: ca. 60 x 30 x 29 mm (L x B x H)
- Gewicht: ca. 60 g (inkl. Batterien)

Bestellinformationen:

Einheit	Art. Nr.	Bezeichnung
Stk.	M900035	PC-60B STRONG Fingerpulsoximeter



PC-60B
Fingerpulsoximeter

Art.-Nr. M900001

- scharfes, glasklares LCD-Display – Anzeige: Pulsfrequenz (PR), Perfusionsindex (PI) und aktuelle Sauerstoffsättigung
- blaue Bildschirm-Backgroundbeleuchtung
- automatische Ein-/Ausschaltfunktion
- visueller u. akustischer Alarm
- Betrieb bis zu 30 Stunden mit 2x AAA-Batterien
- Maße: ca. 66 x 36 x 33 mm (L x B x H)
- Gewicht: ca. 60 g (inkl. Batterien)

Bestellinformationen:

Einheit	Art. Nr.	Bezeichnung
Stk.	M900001	PC-60B Fingerpulsoximeter

Pulsoximetrie

... am Puls der Zeit



FUNKTIONENÜBERSICHT

MODELL / FUNKTION	PC-60B	PC-60B PRO/STRONG	PC-60E	PC-60C PRO	PC-60D
Display-Art	S – L – M	D – O – M	D – O – C	D – O – C	D – O – C
SpO ₂ (Sauerstoffsättigung)	x	x	x	x	x
PR (Herzfrequenz)	x	x	x	x	x
PI (Perfusionsindex)	x	x	–	x	x
Plethysmogramm	–	x	x	x	x
automat. Anschalten	x	x	x	x	x
automat. Ausschalten	x	x	x	x	x
voreingestellter Alarm	x	x	x	x	x
Alarmeinstellung	–	–	–	x	–
Pulston	–	–	–	x	–
Anz. niedrig. Batteriestatus	x	x	x	x	x
Automat. drehbares Display	–	–	x	x	x

Zeichen: "x" diese Funktion ist verfügbar; "–" diese Funktion ist nicht verfügbar. Display-Art: M=monochrom D=zweifärbig; C=färbig; L=LCD; O=OLED; S=Segment; D=Punkt-Matrix

Technische Spezifikationen

ENERGIEVERSORGUNG

2 x LR03 (AAA) Alkaline-Batterien
Spannungsversorgung: 3.0VDC
Betriebsstrom: ≤40mA

SPO₂-PARAMETER SPEZIFIKATIONEN

Messfühler: Dual-Wellenlängen- LED-Sensor

Gemessene Wellenlänge:

Rotes Licht: 663 nm, Infrarotlicht: 890 nm.

Maximal abgegebene optische Leistung:

im max. Durchschnitt weniger als 1.5mW

Messbereich:

35~99%

Messgenauigkeit: Im SpO₂-Bereich von 70% bis 100% weicht der Wert nicht mehr als 3% ab.

Anmerkung: Genauigkeit wird gemäß der ISO 9919 definiert als Abweichung vom Effektivwert.

HERZFREQUENZPARAMETER SPEZIFIKATIONEN

Messbereich: 30~240 Schl./Min.
Messgenauigkeit: ±2 Schl./Min. oder ±2%
(je nachdem welche Abweichung größer ist)

PERFUSIONSINDEX(PI)- ANZEIGE

Bereich: 0~20%

EINGESTELLTE ALARMGRENZEN

SPO₂-Alarm: Untergrenze: 90%

Herzfrequenzalarm:

Standard-Obergrenze: 120 Schl./Min.
Standard-Untergrenze: 50 Schl./Min.

EINSTELLBARER ALARM FÜR PC-60C PRO (PC-60C1)

SPO₂- Alarmgrenzen:
Einstellbarer Bereich der Untergrenze: 85~95%

Alarmgrenzen für Herzfrequenz:

Einstellbarer Bereich der Untergrenze: 30~60 Schl./Min.
Einstellbarer Bereich der Obergrenze: 100~240 Schl./Min.

SPO₂ -Alarm: Standard-Untergrenze: 85%

Herzfrequenzalarm:

Standard-Obergrenze: 120 Schl./Min.
Standard-Untergrenze: 50 Schl./Min.

AKUSTISCHE & VISUELLE ALARMFUNKTIONEN

Wenn bei der Messung die voreingestellten SpO₂- oder Herzfrequenz-Alarmgrenzen überschritten werden, wird der Alarm automatisch ausgelöst und die überschrittenen Werte leuchten auf.

UMGEBUNGSANFORDERUNGEN

Betriebstemperatur: 5~40°C
Betriebsfeuchtigkeit: 30~80%
Atmosphärischer Druck: 70~106kPa

MESSUNG BEI GERINGER DURCHBLUTUNG

Die Messgenauigkeit von SpO₂ und PR bleibt stets präzise, wie oben beschrieben bei einer Amplitudenmodulation unter 0.6%.

STÖRSICHERHEIT VON UMGEBENDEM LICHT

Die Abweichung des SpO₂-Wertes bei einer Messung in einem natürlich beleuchteten und einem dunklen Raum liegt bei weniger als ±1%.

STÖRSICHERHEIT BEI EINER INTERFERENZ VON 50HZ / 60HZ

Die SpO₂ und PR-Werte sind genau und verlässlich. Sie wurden mit einem BIO-TEK Pulsoximetersimulator überprüft.

Maße: 66 mm (L) x 36 mm (W) x 33 mm (H)

Nettogewicht: 60g (inkl. Batterien)

KLASSIFIZIERUNG

Elektrische Schutzklasse: Intern versorgtes Gerät.
Elektrischer Schutzgrad:
Typ BF geprüfte Bauelemente

Wasserschutzgrad: Gewöhnliches Gerät ohne besonderen Schutz vor Wassereintritt (ausgenommen PC-60B STRONG).

Elektro-Magnetische Kompatibilität:
Gruppe I, Klasse B



CREATIVE MEDICAL

Bestellinformationen:

Einheit	Art. Nr.	Bezeichnung
Stck.	M900004	PC-60E Fingerpulsoximeter
Stck.	M900001	PC-60B Fingerpulsoximeter
Stck.	M900035	PC-60B STRONG Fingerpulsoximeter
Stck.	M900013	PC-60B PRO Fingerpulsoximeter
Stck.	M900012	PC-60C PRO Fingerpulsoximeter
Stck.	M900003	PC-60D Kids Fingerpulsoximeter

Optionen / Zubehör:

Einheit	Art. Nr.	Bezeichnung
Stck.	M900008	Soft-Sensor Kinder für PC-60E
Stck.	M900010	Fingertip-Sensor Kinder für PC-60E
Stck.	M900011	Wrap-Sensor Babys, Kleinkinder/Kinder für PC-60E, mit Klettverschluss (nur Einzelpersoneneinsatz)
Stck.	M900022	Aufbewahrungstasche Fingerpulsoximeter blau
Stck.	M900023	Aufbewahrungstasche Fingerpulsoximeter orange

Ihr Handelspartner vor Ort:



BEXAMED
Medizintechnik rettet Leben

BEXAMED GmbH
Bremer Straße 54 · D · 90765 Fürth
Tel.: +49 (0) 911/97 11 98 - 0
Fax: +49 (0) 911/97 11 98 - 22
Mail: info@bexamed.de
Web: www.bexamed.de

Die dargestellten Produkte sind nur ein Auszug unseres Produktsortimentes. Genaue Details und Produktinformationen erhalten Sie auf Anfrage oder unter www.bexamed.de.

Alle verwendeten Markennamen bleiben Eigentum des jeweiligen Markeninhabers. Für Irrtümer, mögliche Druckfehler und Farbabweichungen übernehmen wir keine Haftung. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche Sie ebenfalls unter www.bexamed.de einsehen können.

Beratung, Informationen und Bestellungenannahme unter: **0911/97 11 98 - 0.**