

Wischtuch-Spender

Anwendungsanleitung



1. Schutzkittel und Arbeitshandschuhe benutzen, um sich zu schützen und Kontamination zu verhindern.



2. Trockene INTERMED Vliestuchrolle aus der Verpackung nehmen und in den geöffneten Spender einsetzen. *



3. INTERMED Schnelldesinfektion N oder angesetzte INTERMED Flächendesinfektion (1,5 l) spiralförmig in Wischtuchspender einfüllen. **



4. Das erste Wischtuch aus der Mitte der Tuchrolle herausziehen, dann den vorderen Teil des Tuches durch das sternförmige Entnahmesystem führen.



5. Deckel des Wischtuch-Spenders durch festes Andrücken verschließen.



6. Schutzdeckel des Entnahmesystems fest verschließen. Darauf achten, dass das erste Tuch vollständig vom Schutzdeckel umschlossen und damit vor Austrocknung geschützt ist.



7. Beigefügtes Decketikett aufkleben. Die vollständig ausgefüllten Ansatzinformationen (Produktname, Konzentration, Einwirkzeit, Charge, Ansatz) eintragen.



8. Der befüllte Wischtuch-Spender ist einsatzbereit, wenn nach ca. 30-60 Minuten alle Tücher durchtränkt sind. Das erste Tuch ist zu verwerfen! Nach jedem Gebrauch Spender wieder fest verschließen.

* Alternative: Bereits vorgetränkte Tücher (z. B. INTERMED QuickWipes) mit dem Beutel einsetzen und mit Schritt 4 fortfahren.

** Sollten Sie andere Lösungen verwenden, beachten Sie bitte die Herstellerangaben.